

# BergaMASK

Made in Italy

Maschera Protettiva  
(PROTECTIVE MASK)

Protetta da Modello di Utilità (PROTECTED BY UTILITY MODEL)



## Specifiche, Specifications:


- Auto-sterilizzante in microonde o con qualsiasi fonte di calore  
(SELF-STERILIZING IN MICROWAVE OVEN OR WITH ANY HEAT SOURCE)
- Silicone medicale certificato, permanentemente antibatterico grazie a ioni d'argento  
(MEDICAL CERTIFICATED SILICON, PERMANENTLY ANTIMICROBIAL THANKS TO THE PRESENCE OF SILVER IONS)
- Ergonomica e regolabile  
(ERGONOMIC AND ADJUSTABLE)
- Filtri monouso facili da montare  
(DISPOSABLE FILTERS EASY TO FIX)
- Filtri di ricambio economici e facili da acquistare  
(ECONOMIC REPLACEMENT FILTERS EASY TO BUY)

## Certificazioni, Certifications:

- 2001/95/CE
- IEC 61882:2016
- IEC 61511-1:2016 Functional safety
- FDA EU 2002/72/CE
- RoHs, REACH

## Modalità di utilizzo, Instructions for use:

- Inserire il filtro in TNT all'interno dell'apposita sede centrale e bloccarlo inserendo l'insero plastico  
(INSERT THE TNT FILTER INSIDE THE APPROPRIATE CENTRAL SEAT AND LOCK IT BY INSERTING THE PLASTIC INSERT)
- Inserire i cordini all'interno delle apposite sedi  
(INSERT THE CORDS INSIDE THE SPECIAL SEATS)
- Indossare la maschera portando gli elastici dietro la nuca o dietro le orecchie e regolandoli secondo la propria comodità  
(WEAR THE MASK BY WEARING THE ELASTICS BEHIND THE NAPE OR BEHIND THE EARS AND ADJUSTING THEM ACCORDING TO YOUR COMFORT)

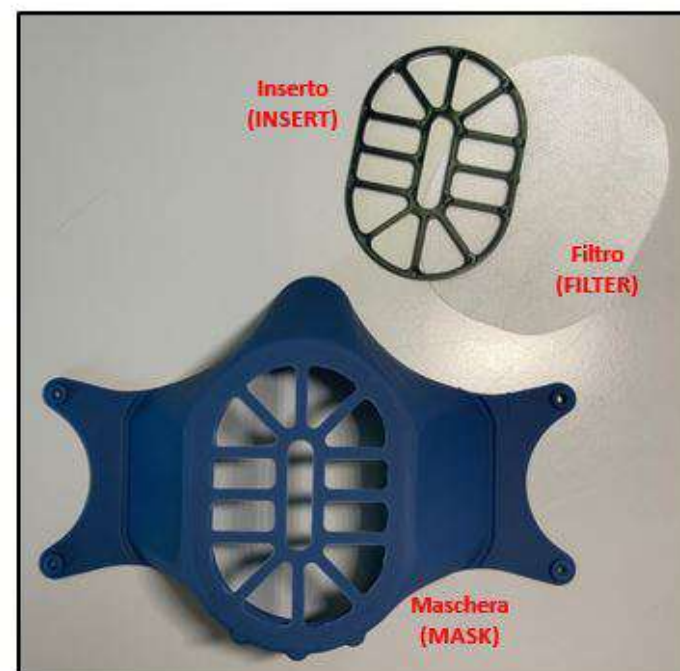

## Metodo di Sterilizzazione, Sterilization method :

- Maschera auto-sterilizzante in microonde per 5 minuti a 600w  
(MASK SELF-STERILIZING IN MICROWAVE OVEN FOR 5 MINUTES AT 600W)
- Insero plastico auto-sterilizzante in forno a 100° o in acqua bollente per 5 minuti  
(PLASTIC INSERT STERILIZING IN OVEN AT 100°C OR IN BOILING WATER FOR 5 MINUTES)
- In caso di assoluta necessità è possibile sterilizzare anche il filtro in TNT in forno a 100°C o in acqua bollente per 5 minuti. Per mantenere una respirabilità ottimale è comunque consigliato l'utilizzo giornaliero di filtri nuovi  
(IF ABSOLUTELY NECESSARY, IT IS POSSIBLE TO STERILIZE EVEN THE TNT FILTER IN OVEN AT 100°C OR IN BOILING WATER FOR 5 MINUTES. HOWEVER, THE DAILY USE OF NEW FILTERS IS RECOMMENDED TO HAVE ALWAYS THE OPTIMAL BREATHABILITY)